

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΑΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ)

Προτείνεται η λήψη **διπλού δείγματος** για κάθε εξέταση.

Για κάθε δείγμα που λαμβάνεται, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. ΤΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗ ΜΠΑΤΟΝΕΤΑ ΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ.



2. Η ΜΠΑΤΟΝΕΤΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ -ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΘΙΚΤΗ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ.
3. Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΟΝΕΤΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΟΥΛΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΕΙΑΣ).



4. ΤΡΙΒΟΝΤΑΣ, ΜΕ ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ -ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΟΥΛΙ ΤΗΣ ΜΠΑΤΟΝΕΤΑΣ- ΣΥΛΛΕΓΕΤΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΛΗΨΗ ΓΙΑ 30-60 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΑΓΟΥΛΟ.
5. ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ, Η ΜΠΑΤΟΝΕΤΑ ΑΦΗΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ ΓΙΑ ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ -ΜΕ ΞΕΚΟΥΜΠΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ, ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ.
6. ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ, Η ΜΠΑΤΟΝΕΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΑΛΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ.
7. ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ DNA HEALTH DIAGNOSTICS, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 39, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

*Πριν τη δειγματοληψία προτείνεται αποχή από τροφή, νερό καθώς και αποχή από το κάπνισμα για τουλάχιστον 30 λεπτά.*